



Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> jest specjalnie opracowanym przyrządem do usuwania kleszczy pasożytujących na skórze zwierząt i ludzi.

- Usuwa wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość (od 1/10 mm) i umiejscowienie.
- Nie urywa i nie pozostawia w skórze hypostomu\* kleszcza.
- Nie ściska odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami (choroba z Lyme/borelioza, zapalenie mózgu, piroplazmoza/babeszjoza...).
- Nie wymaga wspomaganie produktami chemicznymi (alkohol, eter...) ani żadnymi innymi (tłuszcz, krem ...).
- Usuwa kleszcza szybko, łatwo i bez bólu.
- Jest niełamiwy, wytrzymały i można go używać w nieskończoność.

## DLACZEGO TAK WAŻNE JEST USUNIĘCIE KLESZCZA?



Kleszcze są pasożytami, które żywią się krwią zwierząt i ludzi. W czasie tego „posiłku” kleszcze mogą wprowadzić do ciała żywiciela groźne choroby, gdyż część kleszczy jest nosicielami czynników chorobotwórczych

(bakterie, pasożyty ...).

Niestety, ilość kleszczy nosicieli w ostatnich latach znacznie wzrosła.

**Aby zminimalizować ryzyko zarażenia chorobą, kleszcze muszą zostać usunięte ze skóry najszybciej jak to możliwe, bez urwania hypostomu\*, bez ściskania ciała kleszcza, drażnienia go lub zabijania przed wyciągnięciem.**

Można ograniczyć ilość ukąszeń przez kleszcze używając chemicznych środków odstraszających, jednak nie chronią one w 100%; wszyscy właściciele zwierząt, turyści, itd. ... powinni mieć pod ręką skuteczny przyrząd do usuwania kleszczy.



## DLACZEGO NALEŻY UŻYWAĆ HACZYKA O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup> ?

Najważniejsze jest, aby nie ściskać kleszcza w trakcie usuwania go. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wydalenia śliny przez kleszcza, co może wywołać choroby i/lub alergię.


Pęsety i inne przyrządy dostępne aktualnie na rynku ściskają ciało kleszcza. Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup>, opracowany przez lekarza weterynarii, bierze pod uwagę morfologię kleszcza i nie ściska jego odwłoka w trakcie usuwania.

Hypostom\* kleszcza najeżony jest małymi kolcami, które pozwalają mu na umocowanie w skórze.

Kiedy kleszcza ciągniemy, kolce kotwiczą się i blokują „główkę” kleszcza w skórze. Ciągnięcie może więc spowodować urwanie owej „główki”, która w całości lub w części pozostaje w skórze. Może to wywołać bolesny stan zapalny lub infekcję.

Kiedy wykonujemy ruch obrotowy, kolce hypostomu „składają się” wokół osi obrotu, a kleszcz z łatwością wysuwa się ze skóry, bez ciągnięcia, a więc eliminując niemal całkowicie ryzyko urwania „główki”.


Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> usuwa kleszcze ruchem obrotowym, a nie poprzez wyciąganie ich; ponadto, dzięki swojemu kształtowi i wielkości, bardzo łatwo się go używa.

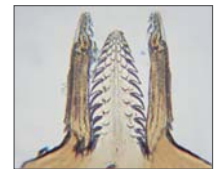

**Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> jest jedynym przyrządem, który pozwala użytkownikowi uchwycenie kleszcza bez ściskania i usunięcie go ruchem obrotowym. To najlepszy sposób pozbycia się kleszcza w całości i bezpiecznie.**

\* Część aparatu gębowego, którą kleszcz wsuwa do skóry żywiciela

## SPOSÓB UŻYCIA

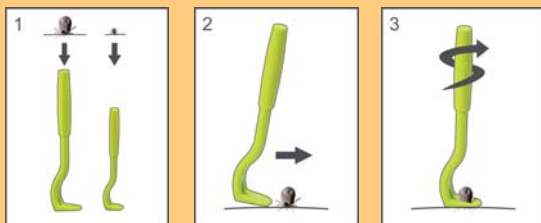

1. Dobrać haczyk w zależności od wielkości kleszcza.
2. Wsunąć go od strony bocznej kleszcza.
3. Lekko unieść haczyk i PRZEKRĘCIĆ aż kleszcz się wysunie (1 – 3 obroty).

## PATENTY I WZORY ZASTRZEŻONE

Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> chroniony jest międzynarodowymi patentami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach: EP 0 821 571, USP 5.876.409.

Haczyk sprzedawany jest pod nazwą O'TOM<sup>®</sup> lub Tick Twister<sup>®</sup>, zależnie od kraju i sieci dystrybucji. Marki O'TOM<sup>®</sup> i Tick Twister<sup>®</sup> są zastrzeżonymi wzorami towarowymi należącymi do H3D.



## PRODUKCJA: SPECYFICZNY SUROWIEC

Haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> produkowany jest z poliacetalu. Wybraliśmy ten polimer z kilku powodów:

- trwałość,
- odporność na rozpuszczalniki (alkohol, eter, ...) i inne substancje, które niezorientowany użytkownik mógłby zastosować przed przystąpieniem do usuwania kleszcza,
- nietoksyczność; poliacetal podlega recyklingowi (jest całkowicie recyklingowalny) a przy spalaniu nie wydziela chloru.

## ZAUFALI HACZYKOWI O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup>!

### “VETERINARY RECORD” Wielka Brytania

Według ankiety opublikowanej w profesjonalnym periodyku „Veterinary Record” haczyk O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> jest ulubionym i najbardziej rekomendowanym przyrządem, tak przez autorów (specjalistów parazytologii), jak i lekarzy weterynarii, którzy uczestniczyli w ankiecie.

### “TIER BILD ZEITUNG” w Niemczech

Haczyk O'TOM<sup>®</sup> wygrał test porównawczy przeprowadzony przez ten magazyn.

### ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

BADA (Borreliosis and Associated Diseases Awareness) z Wielkiej Brytanii rekomenduje użycie haczyka O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup>.

### UŻYTKOWNICY

Używają go miliony osób. Oni wszyscy nie mogą się mylić!

*“Absolutnie skuteczna broń przeciw kleszczom wydaje się wreszcie wynaleziona... Trzy małe obroty i pozbywamy się kleszczy.”* - Tygodnik “Femme actuelle”

*“To bardzo sprytne ... jeden ruch haczykiem, skutecznym, niełamliwym i w dodatku tanim.”* - Miesięcznik “Atout Chien”

*“Wreszcie niezawodny sposób poradzenia sobie z kleszczami ... bez utraty głowy. Absolutnie skuteczna broń antykleszczowa... cudowny przyrządek.”* - Miesięcznik “Cheval Magazine”

*“Bardzo ergonomiczny, szybki i łatwy w użyciu, a to jest super zaleta w przypadku psów, które nie umieją ustać spokojnie.”* - N.C., asystentka weterynaryjna

*“Bardzo go doceniamy! Jesteśmy oszołomieni łatwością, z jaką teraz usuwamy kleszcze. Dziękujemy!”*  
S.S., lekarz weterynarii

Więcej informacji:  
H3D - FRANCE - [www.otom.com](http://www.otom.com)

Dystrybucja w Polsce:  
PORTICA  
Tel. 42 631 00 13 - Fax 42 636 46 00  
[www.portica.pl](http://www.portica.pl)