



Tick Twister® Kleszczołapki to specjalnie opracowany przyrząd do usuwania kleszczy pasożytniczych na skórze zwierząt i ludzi.

- Usuwa wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość (od 1/10 mm) i umiejscowienie.
- Nie urywa i nie pozostawia w skórze hypostomu\* kleszcza.
- Nie ściska odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami (choroba z Lyme/borelioza, zapalenie mózgu, piroplazmoza/babesjoza...).
- Nie wymaga wspomaganie produktami chemicznymi (alkohol, eter...) ani żadnymi innymi (tłuszcz, krem ...).
- Usuwa kleszcza szybko, łatwo i bez bólu.
- Jest niełamiwy, wytrzymały i można go używać w nieskończoność.

### DLACZEGO TAK WAŻNE JEST PRAWIDŁOWE USUNIĘCIE KLESZCZA?



Kleszcze są pasożytami, które żywią się krwią zwierząt i ludzi. W czasie tego „posiłku” kleszcze mogą wprowadzić do ciała żywiciela groźne choroby, gdyż część kleszczy jest nosicielami czynników chorobotwórczych

(bakterie, pasożyty ...).

Niestety, ilość kleszczy nosicieli w ostatnich latach znacznie wzrosła.

**Aby zminimalizować ryzyko zarażenia chorobą, kleszcze muszą zostać usunięte ze skóry najszybciej jak to możliwe, bez urwania hypostomu\*, bez ściskania ciała kleszcza, drażnienia go lub zabijania przed wyciągnięciem.**

Można ograniczyć ilość ukąszeń przez kleszcze używając chemicznych środków odstraszających, jednak nie chronią one w 100%; wszyscy właściciele zwierząt, turyści, itd. ... powinni mieć pod ręką skuteczny przyrząd do usuwania kleszczy.



### DLACZEGO NALEŻY UŻYWAĆ HACZYKA Tick Twister® Kleszczołapki ?

Najważniejsze jest, aby nie ściskać kleszcza w trakcie usuwania go. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wydalenia śliny przez kleszcza, co może wywołać choroby i/lub alergię.


Pęsety i inne przyrządy dostępne aktualnie na rynku ściskają ciało kleszcza. Haczyk Tick Twister® Kleszczołapki, opracowany przez lekarza weterynarii, bierze pod uwagę morfologię kleszcza i nie ściska jego odwłoka w trakcie usuwania.

Hypostom\* kleszcza najeżony jest małymi kolcami, które pozwalają mu na umocowanie w skórze.

Kiedy kleszcza ciągniemy, kolce kotwiczą się i blokują „główkę” kleszcza w skórze. Ciągnięcie może więc spowodować urwanie owej „główki”, która w całości lub w części pozostaje w skórze. Może to wywołać bolesny stan zapalny lub infekcję.

Kiedy wykonujemy ruch obrotowy, kolce hypostomu „składają się” wokół osi obrotu, a kleszcz z łatwością wysuwa się ze skóry, bez ciągnięcia, a więc eliminując niemal całkowicie ryzyko urwania „główki”.

Haczyk Tick Twister® Kleszczołapki usuwa kleszcze ruchem obrotowym, a nie poprzez wyciąganie ich; ponadto, dzięki swojemu kształtowi i wielkości, bardzo łatwo się go używa.

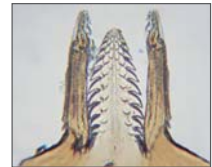


**Haczyk Tick Twister® Kleszczołapki jest jedynym przyrządem, który pozwala użytkownikowi uchwycenie kleszcza bez ściskania i usunięcie go ruchem obrotowym. To najlepszy sposób pozbycia się kleszcza w całości i bezpiecznie.**

\* Część aparatu gębowego, którą kleszcz wsuwa do skóry żywiciela

# Tick Twister® Kleszczołapki



## SPOSÓB UŻYCIA

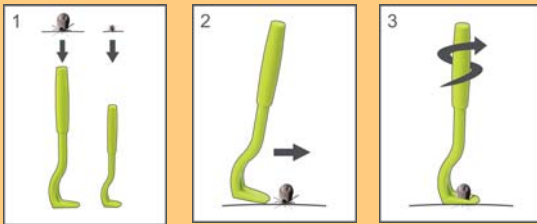

1. Dobrać haczyk w zależności od wielkości kleszcza.
2. Wsunąć go od strony bocznej kleszcza.
3. Lekko unieść haczyk i PRZEKRĘCIĆ aż kleszcz się wysunie (1 – 3 obroty).

## PATENTY I WZORY ZASTRZEŻONE

Haczyki Tick Twister® Kleszczołapki zostały wynalezione i opatentowane przez lekarza weterynarii Denis Heitz z Francji. Haczyk sprzedawany jest pod nazwą O'TOM® lub Tick Twister®, zależnie od kraju i sieci dystrybucji. Marki O'TOM® i Tick Twister® są zastrzeżonymi wzorami towarowymi należącymi do firmy H3D. Polska nazwa produktu - Kleszczołapki jest chroniona prawami autorskimi należącymi do dystrybutora, firmy PORTICA.

Oryginalne haczyki Tick Twister® Kleszczołapki produkowane są wyłącznie przez firmę H3D we Francji. Tylko oryginalny produkt jest gwarancją bezpiecznego usunięcia kleszcza.



## PRODUKCJA: SPECYFICZNY SUROWIEC

Haczyk Tick Twister® Kleszczołapki produkowany jest z poliacetalu. Wybraliśmy ten polimer z kilku powodów:

- trwałość,
- odporność na rozpuszczalniki (alkohol, eter, ...) i inne substancje, które niezorientowany użytkownik mógłby zastosować przed przystąpieniem do usuwania kleszcza,
- nietoksyczność; poliacetal podlega recyklingowi (jest całkowicie recyklingowalny) a przyspalaniu nie wydziela chloru.

## ZAUFALI HACZYKOWI Tick Twister® Kleszczołapki!

**“VETERINARY RECORD” Wielka Brytania**  
Według ankiety opublikowanej w profesjonalnym periodyku „Veterinary Record” haczyk Tick Twister® Kleszczołapki jest ulubionym i najbardziej rekomendowanym przyrządem, tak przez autorów (specjalistów parazytologii), jak i lekarzy weterynarii, którzy uczestniczyli w ankiecie.

**“TIER BILD ZEITUNG” w Niemczech**  
Haczyk O'TOM® wygrał test porównawczy przeprowadzony przez ten magazyn.

**ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO**  
BADA (Borreliosis and Associated Diseases Awareness) z Wielkiej Brytanii rekomenduje użycie haczyka Tick Twister® Kleszczołapki.

## UŻYTKOWNICY

**Używają go miliony osób. Oni wszyscy nie mogą się mylić!**

*“Absolutnie skuteczna broń przeciw kleszczom wydaje się wreszcie wynaleziona... Trzy małe obroty i pozbywamy się kleszczy.” - Tygodnik “Femme actuelle”*

*“To bardzo sprytne ... jeden ruch haczykiem, skutecznym, niełamliwym i w dodatku tanim.” - Miesięcznik “Atout Chien”*

*“Wreszcie niezawodny sposób poradzenia sobie z kleszczami ... bez utraty głowy. Absolutnie skuteczna broń antykleszczowa... cudowny przyrządek.” - Miesięcznik “Cheval Magazine”*

*“Bardzo ergonomiczny, szybki i łatwy w użyciu, a to jest super zaleta w przypadku psów, które nie umieją ustać spokojnie.” - N.C., asystentka weterynaryjna*

*“Bardzo go doceniamy! Jesteśmy oszołomieni łatwością, z jaką teraz usuwamy kleszcze. Dziękujemy!”  
S.S., lekarz weterynarii*

Producent:  
H3D - FRANCE - [LIRRWRPERP](http://LIRRWRPERP) - [www.otom.com](http://www.otom.com) □

Dystrybucja w Polsce:  
PORTICA  
Tel. 42 631 00 13 - Fax 42 636 46 00  
[biuro@portica.pl](mailto:biuro@portica.pl) - [www.portica.pl](http://www.portica.pl)